

# Duurzaam, lichtgewicht en Opvouwbaar




Hi-Torque front suspension

De i-Go™ van Pride heeft een geavanceerde vouw-technologie, zodat hij snel en gemakkelijk kan worden vervoerd. De i-Go heeft vering aan de voorkant, een duurzaam zitsysteem, bergruimte onder de stoel en nog veel meer. Ontworpen om binnen om het even welke kleine ruimte te passen en met een gewicht van slechts 19,8 kilo is de i-Go de perfecte keus voor de actieve individu.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>



## Specificaties

MAXIMUM BELADING	120 kg
MAXIMALE SNELHEID <sup>2</sup>	Tot 6 km/u
BODEMVRIJHEID <sup>1</sup>	44 mm
LENGTE <sup>1</sup>	876 mm
BREEDTE <sup>1</sup>	600 mm
DRAAICIRKEL <sup>1</sup>	900 mm
STANDAARD BESTURING	Micon Control System
TOTAAL GEWICHT (ZONDER ACCU'S)	19,8 kg
ACCUGEWICHT <sup>1</sup>	1,35 kg (per stuk)
VERING	Voor
ACCU'S	2 x 6.6 Ah, Li-ION Accu
ZITSYSTEEM	Saddle back seat
BANDEN	Anti-kiepwiel: 7" solid Zwenkwiel: 8,5" solid (achter)
COLOUR	 Silver

### Notes:

- 1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
- 2) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%)
- 3) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

## Eigenschappen

- Groot, veilig opslagcompartiment
- Snel te vouwen in 5 gemakkelijke stappen
- Unieke zitting voor extra comfort
- Voorvering
- Lichtgewicht lithium-Ion accu's

## Opvouwen



1 Schakel uit en verwijder de joystick



2 Plaats de joystick in het vak aan de achterkant en verwijder zittkussen



3 Vouw rugleuning naar beneden en trek dan aan beide armleuningen naar achter.



4 Trek de twee zwarte hendels naar elkaar (aan de achterzijde)



5 Druk het frame naar beneden tot de i-Go volledig plat is.



6 De i-Go is nu klaar voor transport!