

PRIDE[®]
M O B I L I T Y

Brugervejledning



GO●CHAIR

Sikkerhedsbestemmelser



ADVARSEL! En autoriseret Pride-udbyder eller en kvalificeret tekniker skal udføre den indledende opsætning af denne el-kørestol og skal udføre alle procedurerne i denne vejledning.

Symbolerne nedenfor bruges i denne brugsanvisning og på Go-Chair til at identificere advarsler og vigtig information. Det er meget vigtigt, at du læser dem og forstår dem fuldstændigt.



ADVARSEL! Angiver en potentielt farlig tilstand/situation. En manglende overholdelse af de foreskrevne fremgangsmåder kan enten medføre personskade, beskadigelse af komponenter eller fejlfunktion. På produktet er mærket for dette gengivet med et sort symbol på en gul trekant med sort kant.



OBLIGATORISK! Disse handlinger skal udføres som angivet. Manglende udførelse af obligatoriske handlinger kan medføre personskade og/eller beskadigelse af udstyr. På produktet er mærket for dette gengivet med et hvidt symbol på en blå prik med hvid kant.



FORBUDT! Disse handlinger er forbudte. Disse handlinger må ikke udføres på noget tidspunkt eller under nogen omstændigheder. Udførelse af en forbudt handling kan medføre personskade og/eller beskadigelse af udstyr. På produktet er mærket for dette gengivet ved et sort symbol med en rød cirkel og en rød skråstreg.

ANVENDELSESFORMÅL

Den tilsigtede brug af denne Pride Mobility Products-enhed er at yde mobilitetsassistance til personer med bevægelseshandicap, som har kapacitet til at betjene en motoriseret el-kørestol.

Hurtig referenceinformation

Autoriseret Pride udbyder: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Købsdato: _____

BEMÆRK: Disse instruktioner er i overensstemmelse med de nyeste specifikationer og produktoplysninger, der var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer, såfremt disse bliver nødvendige. Eventuelle produktændringer kan betyde mindre variationer mellem afbildninger og forklaringer i denne vejledning og det købte produkt. Den nyeste/aktuelle version af denne vejledning findes på vores hjemmeside.

BEMÆRK: Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE, RoHS og REACH direktiver og krav.

BEMÆRK: Dette produkt opfylder IPX4-klassificeringen (IEC 60529).

BEMÆRK: Dette produkt og dets komponenter er ikke fremstillet med naturgummilatex. Rådfør dig med producenten vedrørende.

Introduktion.....	4
Sikkerhed.....	5
Deres Go-Chair.....	7
Afmontering og montering.....	10
Komfortjusteringer.....	13
Batterier og opladning.....	17
Pleje og vedligeholdelse.....	23

RÅDGIVENDE ERKLÆRING VEDRØRENDE VISSE KOMPONENTER INDBYGGET AF TREDJEPARTSPRODUCENTER I FÆRDIGE EL-STOLE: Når Pride elbaser, sædesystemer eller andre komponenter er inkorporeret i en færdig el-stol, der er fremstillet eller samlet af en tredjepart, er denne tredjepart ansvarlig for at sikre sikkerhed, funktionalitet og lovlig overholdelse af den færdige el-kørestol. Pride giver ingen erklæringer vedrørende sikkerheden, funktionaliteten eller den juridiske overholdelse af den færdige el-stol eller dens komponenter fremstillet af en tredjepart. Selvom vi gør alt for at sikre, at vores komponenter distribueres ansvarligt, bliver producenter, distributører og forbrugere mindet om, at færdige el-stole skal overholde en række offentlige standarder og krav til sikkerhed og funktionalitet.

Hvis det er nødvendigt fysisk at modificere en el-kørestol, herunder tilføjelse af tredjepartskomponenter, for at imødekomme el-kørestolens medicinske behov, en risikovurdering i overensstemmelse med ISO 14971, som beskrevet i ISO_DIS_7176-19 (foreløbig udgivelse) , skal udføres.

Ændringer af el-kørestole, der sandsynligvis vil påvirke overensstemmelse og risikoevaluering, omfatter, men er ikke begrænset til: flytning af sikringspunktsbeslagene; sænke rygstøttens højde; afkortning af sædelængden; tilføjelse af sekundære posturale understøtninger, der ikke er fast fastgjort til el-stolen; tilføjelse af komponenter, der har skarpe kanter (dvs. kanter med en radius på mindre end 0,08 in. [2 mm]); eller enhver ændring, der kompromitterer el-stolens strukturelle integritet.

Sikkerhed

VELKOMMEN til Pride Mobility Products (Pride). Den el-kørestol, du har købt, kombinerer avancerede komponenter med **sikkerhed**, komfort og stil i tankerne. Vi er overbeviste om, at disse designfunktioner giver dig de bekvemmeligheder, du forventer under dine daglige aktiviteter. Når du først har forstået, hvordan du **sikkert** betjener og plejer din el-kørestol, vil den give dig mange års problemfri betjening og service.

Læs og følg alle instruktioner, advarsler og bemærkninger i denne vejledning, før du forsøger at betjene din el-kørestol for første gang. Du skal også læse alle instruktioner, advarsler og noter, der findes i eventuelle supplerende instruktionsbøger til den styreenhed, der fulgte med din el-kørestol inden den første drift. Din **sikkerhed** afhænger af dig såvel som din udbyder, plejer eller sundhedspersonale og brug af god dømmekraft.

Hvis der er nogen oplysninger i denne vejledning, som du ikke forstår, eller hvis du har brug for yderligere hjælp til opsætning eller betjening, skal du kontakte din autoriserede Pride udbyder. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning og dem, der er placeret på din el-kørestol, kan føre til personskade og/eller skade på el-kørestolen, som kan resultere i annullering af reklamationsretten.

Køberaftale

Ved at acceptere levering af dette produkt, lover du, at du ikke vil ændre eller modificere dette produkt eller fjerne eller gøre nogen beskyttelser, skjolde eller andre sikkerhedsfunktioner på dette produkt, ubrugelig eller usikre. Du lover også, at der ikke sker manglende overholdelse, afvisning eller forsømmelse af at installere eftermonteringssæt fra tid til anden leveret af Pride for at forbedre eller bevare sikker anvendelse af dette produkt.

Forsendelse og levering

Før du bruger din el-kørestol, skal du sørge for, at din levering er komplet, da nogle komponenter kan være individuelt pakket. Hvis du ikke modtager en komplet levering, skal du straks kontakte din autoriserede Pride udbyder. Hvis der er opstået skade under transport, enten på emballagen eller indholdet, bedes du kontakte det ansvarlige leveringsfirma.

BEMÆRK: Hvis du nogensinde mister eller forlægger din kopi af denne vejledning, skal du kontakte os, og vi sender dig med glæde en ny med det samme.

Produktsikkerhedssymboler

Symbolerne nedenfor bruges på el-kørestolen til at identificere advarsler, obligatoriske handlinger og forbudte handlinger. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår dem fuldstændigt.

BEMÆRK: Der er flere advarsler identificeret og forklaret i forbruger-sikkerhedsvejledningen, der følger med din el-kørestol. Bliv fortrolig med alle advarsler og sikkerhedsoplysninger, der findes i forbruger- sikkerhedsvejledningen.



Læs og følg informationerne i brugervejledningen.



Ulåst og i frihjuls-mode.

Placer enheden på et jævnt underlag, og stå på den ene side, når der skiftes fra køre-mode til frihjuls-mode eller fra frihjuls-mode til køre-mode.

Låst og i køre-mode.




ELLER



ELLER



Angiver el-kørestolens sikringspunkter.

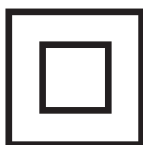

Klasse II-udstyr.



ELLER



Fremstillet i.



El-kørestolens informationsmærke.

Generelle retningslinjer



OBLIGATORISK! Brug ikke din nye Go-Chair for første gang, uden at læse og forstå denne vejledning fuldstændigt.

Din Go-Chair er en avanceret livsforbedringsenhed designet til at øge mobiliteten. Pride leverer en lang række produkter, der bedst passer til Go-Chair-brugerens individuelle behov. Vær opmærksom på, at den endelige udvælgelses- og købsbeslutning vedrørende den type el-kørestol, der skal bruges, er Go-Chair-brugerens ansvar, hvis de er i stand til at træffe en sådan beslutning, og hans/hendes sundhedspersonale (dvs. en læge, fysioterapeut osv.).

Indholdet i denne vejledning er baseret på forventningen om, at en ekspert på mobilitetsenheder korrekt har tilpasset Go-Chair til brugeren og har hjulpet den ordinerende sundhedsmedarbejder og / eller den autoriserede Pride udbyder i instruktionsprocessen til brug af produktet.

Der er visse situationer, herunder nogle medicinske tilstande, hvor Go-Chair-brugeren bliver nødt til at øve sig i at betjene Go-Chair i nærværelse af en uddannet ledsager. En uddannet ledsager kan defineres som et familiemedlem eller en plejeperson, der er specielt uddannet til at hjælpe en Go-Chair-bruger i forskellige dagliglivsaktiviteter.

Når du begynder at bruge din Go-Chair under daglige aktiviteter, vil du sandsynligvis støde på situationer, hvor du har brug for lidt øvelse. Bare tag din tid, og du vil snart være i fuld kontrol og i stand til at bruge Go-Chair med selvsikkerhed, når du manøvrerer gennem døråbninger, til og fra lifter, op og ned ad ramper og hen over moderat terræn.

Nedenfor er nogle forholdsregler, tip og andre sikkerhedshensyn, der hjælper dig med at blive vant til at betjene din Go-Chair sikkert.

Sikkerhedskontrol før brug

Lær følelsen af din Go-Chair og dens evner at kende. Pride anbefaler, at du udfører en sikkerhedskontrol inden hver brug for at sikre, at din Go-Chair fungerer korrekt og sikkert.

Udfør følgende inspektioner, inden du bruger din Go-Chair:

- Kontroller alle elektriske forbindelser. Sørg for, at de er stramme og ikke rustede.
- Kontroller alle regulatorforbindelser til strømbasen. Sørg for, at de er fastgjort korrekt.
- Kontroller bremserne. Se "Pleje og vedligeholdelse."
- Kontroller batteriets opladning. Se "Batterier og opladning."
- Sørg for, at de manuelle frihjulshåndtag er i kørestilstand, inden du sidder på el-kørestolen.


BEMÆRK: Hvis du opdager et problem, skal du kontakte din autoriserede Pride udbyder for at få hjælp.

The Go-Chair


Go-Chair har to hovedenheder: sædeenheten og den elektriske baseenhed. **Se figur 1.** Sædeenheten inkluderer typisk armlæn, ryglæn og sæde. Den elektriske baseenhed inkluderer de to motorer, to drivhjul, to svinghjul, to batterier og en fodplatform. **Se figur 1 og 2.**

Identifikationsnøgle

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ryglæn | 7. Fodplatform |
| 2. Armlæn | 8. Svinghjul |
| 3. Joystick | 9. Drivhjul |
| 4. Styreenhed | 10. Elektriske baseenhed |
| 5. Sæde | 11. Sædeenhed |
| 6. Håndtag til sædet | |

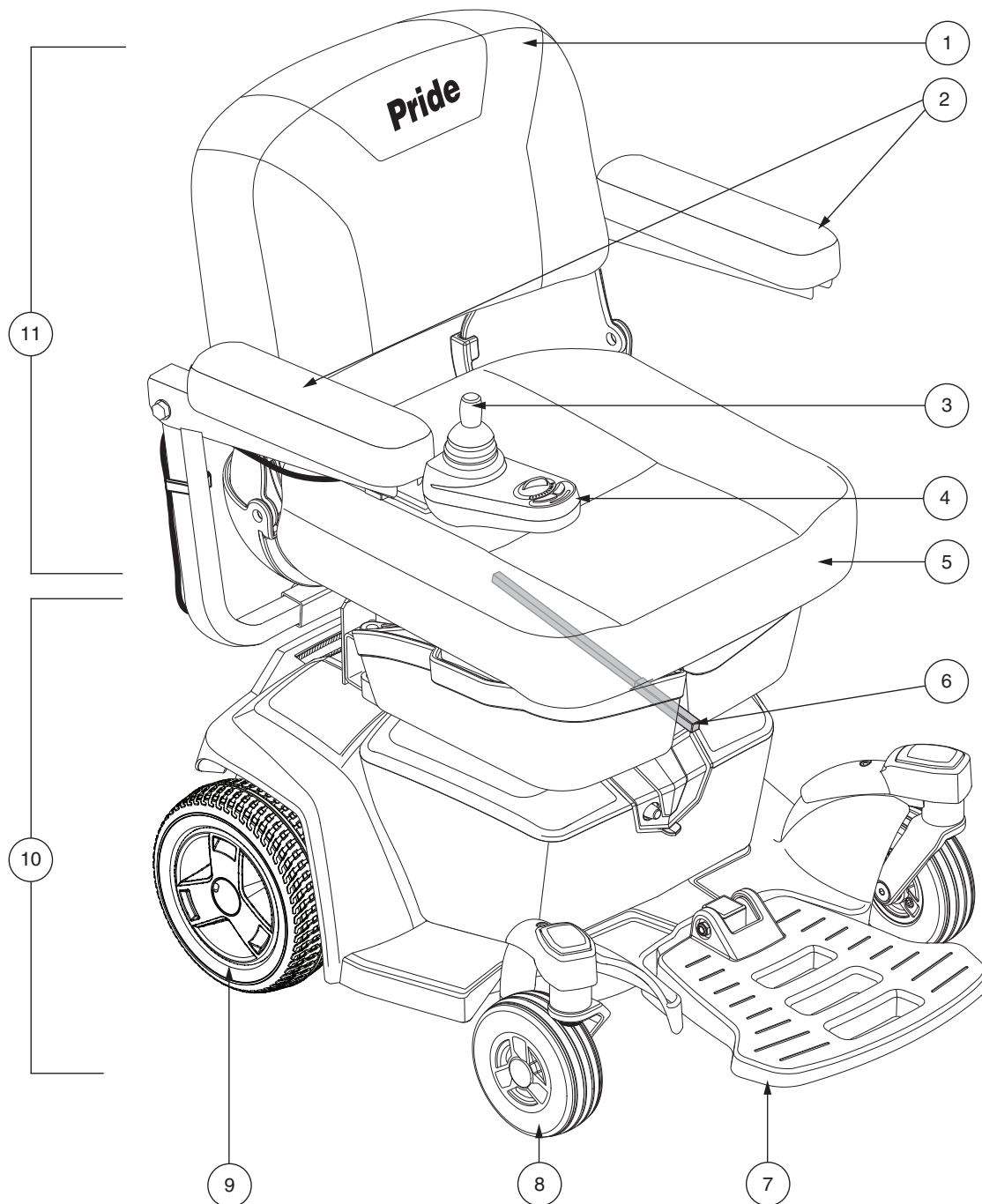

Figur 1. Go-Chair

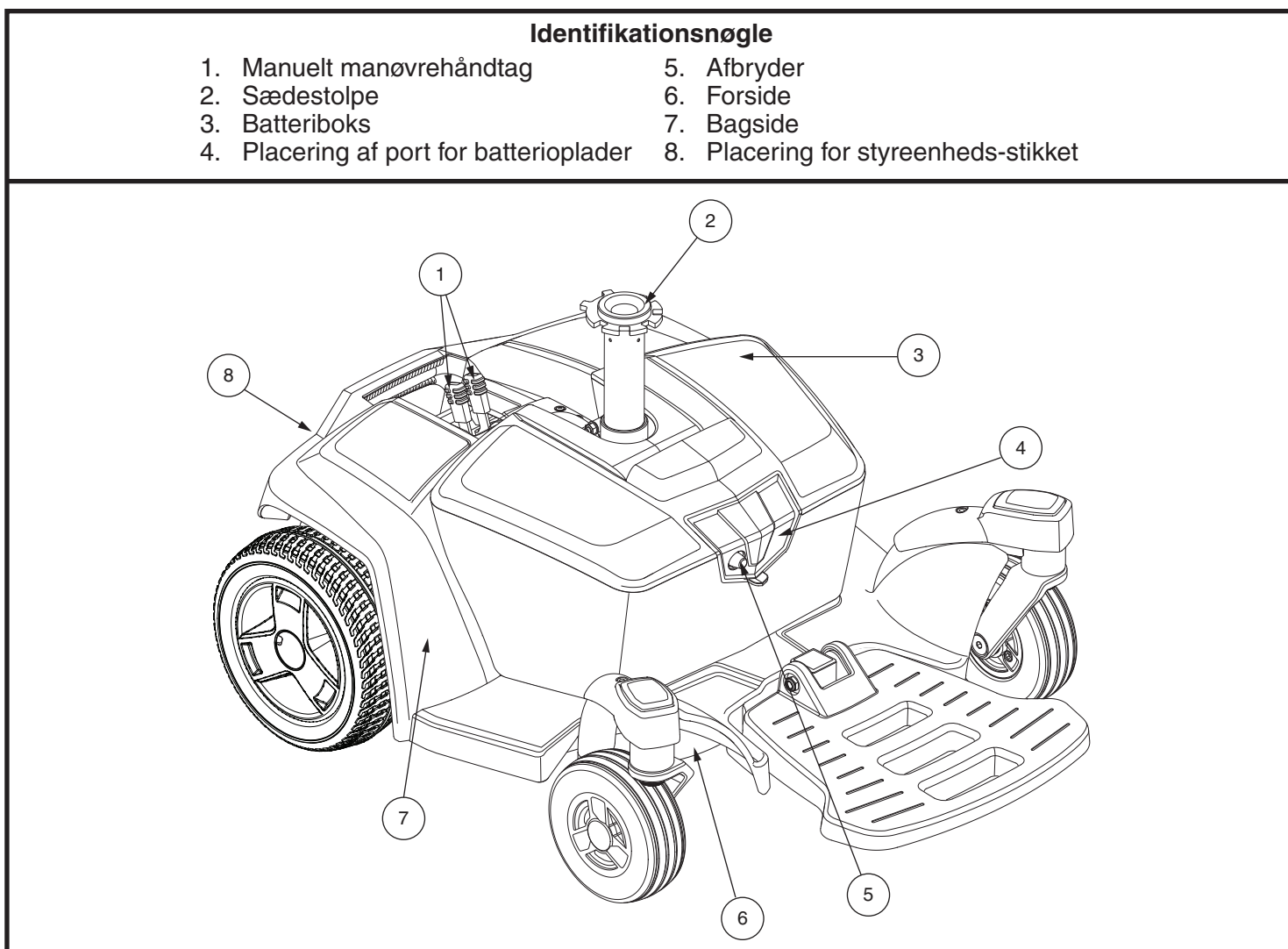

Figur 2. Go-Chair Elektriske Base

Elektriske komponenter

De elektriske komponenter er placeret på den elektriske baseenhed. Hovedafbryderen er placeret på forsiden af batterikassen. Styreenheds-stikket er placeret på bagsiden af den elektriske baseenhed. **Se figur 2.**

Styreenheds-stikket: Det er her styreenheden opretter forbindelse til den elektriske baseenhed. Hver styreenhed bruger en anden type kabel. Uanset hvilken type styreenhed der bruges, skal kablet fastgøres til stikket og må ikke slæbe hen over gulvet.

Batteriopladerens opladerport: Dette giver dig mulighed for at oplade batterierne, når batteriboksen fjernes fra den elektriske baseenhed. Se "Batterier og opladning."

Hovedafbryder: Hovedafbryderen er en sikkerhedsfunktion indbygget i din Go-Chair. Når batterierne og motorerne er hårdt anstrengt (f.eks. ved for store belastninger), springer hovedafbryderen til, for at forhindre beskadigelse af motorerne og elektronikken. Hvis kredsløbet aktiveres, lad din Go-Chair "hvile" i cirka et minut. Tryk derefter på afbryderknappen, tænd for kontrolenheden og fortsæt med normal drift. Hvis hovedafbryderen fortsætter med at aktiveres gentagne gange, skal du kontakte en autoriseret Pride-udbyder.

Manuelt manøvrehandtag

For din bekvemmelighed har din Go-Chair et manuelt frihjulshåndtag på hver motor. Manuelle frihjulshåndtag giver dig mulighed for at deaktivere drivsystemet for at manøvrere stolen manuelt.



ADVARSEL! Brug ikke el-kørestolen, mens drivmotorerne er frakoblet! Frakobl ikke drivmotorerne, når kørestolen er i hældning eller på en skråning, da enheden kan rulle af sig selv! Gå kun i frihjulstilstand, når du er på en plan overflade.



ADVARSEL! Det er vigtigt at huske, at når din Go-Chair er i frihjulstilstand, kobles bremsesystemet fra.

BEMÆRK: Pride anbefaler kraftigt, at du ikke oplader dine batterier, mens du er i frihjulstilstand.

BEMÆRK: Du skal slukke for strømmen, før drivsystemerne deaktiveres. Ellers kan du få en fejlkode på styreenheden. For at slette denne kode skal du slukke for styreenheden og placere Go-Chair i drivtilstand. Tænd derefter styreenheden. Fejlmeddelelsen bør forsvinde. Hvis ikke, skal du kontakte en autoriseret Pride-udbyder.

Sådan aktiveres eller deaktiveres drivsystemet:

1. Find håndtagene på bagsiden af den elektriske baseenhed. **Se figur 3.**
2. Skub de to håndtag mod forsiden af el-kørestolen for at aktivere drivmotorerne (køremodus).
3. Træk de to håndtag mod bagsiden af el-kørestolen for at frakoble drivmotorerne (frihjulstilstand).

Hvis det er vanskeligt at bevæge et håndtag i begge retninger, skal du køre din el-kørestol lidt frem og tilbage. Håndtaget bør derefter flytte til den ønskede position.




ADVARSEL! Brug ikke frihjulshåndtagene som fastgøringspunkter, for at sikre dette produkt.

Svinghjul

Svinghjul er en integreret og vigtig sikkerhedsfunktion i din Go-Chair. De er boltet fast til rammen bag på stolen. **Se figur 3.**



FORBUDT! Fjern ikke svinghjulene eller ændr din Go-Chair på nogen måde, som ikke er autoriseret af Pride.

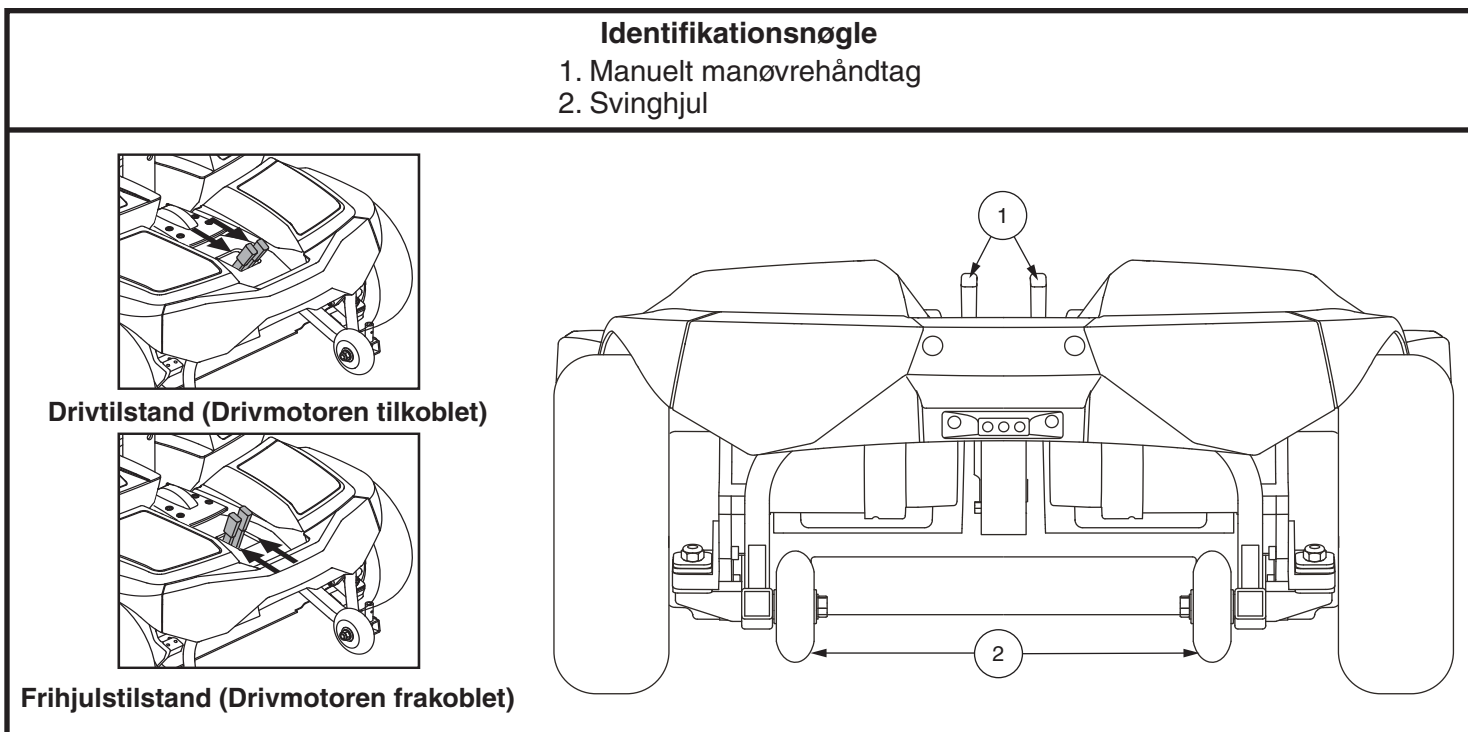

Figur 3. Bagsiden af den elektriske baseenhed


BEMÆRK: Besøg https://www.youtube.com/watch?v=mHsXCJM_oz8 for at få videoinstruktioner om opsætning af el-stol eller scan den viste QR-kode med din smartphone-enhed.



Første samling

Din Go-Chair kræver muligvis noget montering enten før første brug eller efter transport. Det kan også være, at den skal have dele fjernet for at foretage komfortjusteringer. **Figur 4 viser** de dele af Go-Chair, der er designet til at blive adskilt og samlet af en slutbruger eller af en kvalificeret plejer, inden produktet bruges eller når der foretages komfortjusteringer. Der er to sekskantsnøgler, der bruges til kontrol med installation og justering af styreenheden og indstilling af fodplatformen.

BEMÆRK: Enhver nylon låsemøtrik der fjernes under afmontering eller justering af el-kørestolen skal udskiftes med en ny møtrik. Nylon låsemøtrikker bør ikke genbruges, da det kan forårsage beskadigelse af nylonindsatsen, hvilket resulterer i en mindre sikker pasform. Nye låsemøtrikker med nylonindsats fås i lokale byggemarkeder eller gennem din autoriserede Pride udbyder.

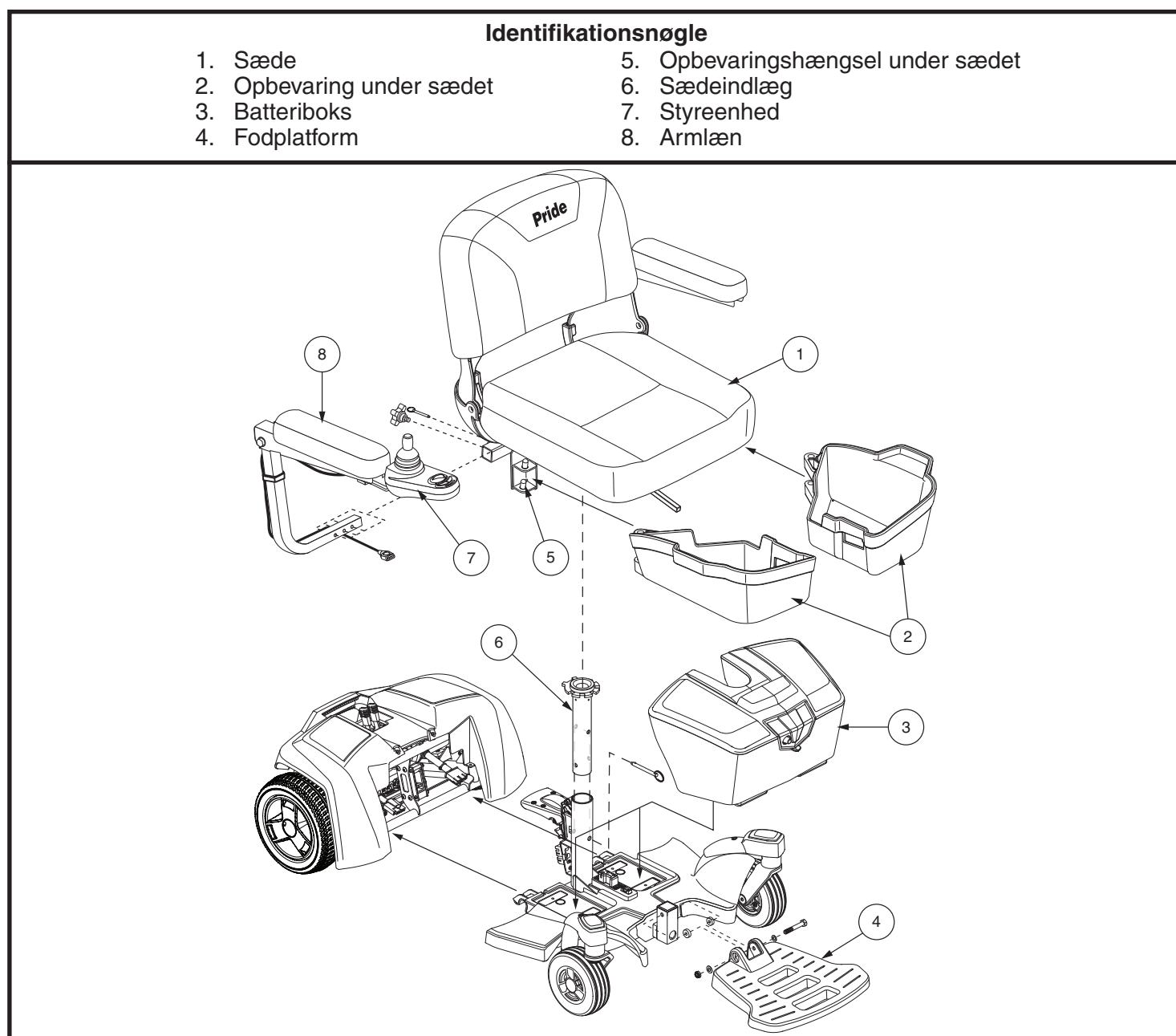

Figur 4. Oversigt over samling af Go-Chair

Sædeinstallation

Det kan være nødvendigt at installere sædet enten inden den første drift eller efter transport af din Go-Chair. Sædet er fastgjort til den elektriske baseenhed med en højdejusterbar sædestolpe.



ADVARSEL! Løft ikke sæderammen op ved armlænene. De er monteret til at kunne dreje rundt, og du kan miste kontrollen over sædet, hvis de gør det.

Sådan installeres sædet:

1. Juster sædehøjden om nødvendigt. Se "Komfortjusteringer."
2. Sæt sædet på sædestolpen. **Se figur 5.**
3. Installer opbevaring under sædet. Se "Komfortjusteringer."
4. Installer styreenheden i armlænet, og spænd skruen fast under armlænet.
5. Før styreselen til bagsiden af den elektriske baseenhed.
6. Sæt styreenhedsstikket i stikket.
7. Fastgør styreselen til armlænet med kabelstrips. **Se figur 5.**




OBLIGATORISK! Undgå beskadigelse af styresele! Undgå at placere styresele på ydersiden af armlænsputen. Før styreselen under armlænet eller mod indersiden af armlænsputen. Brug de korrekte fastgørelsespunkter til styreselen for at forhindre, at styreselen klemmes i dækkene, klemmes i sæderammen eller beskadiges, når man passerer gennem døråbninger.

Adskillelse


Go-Chair adskilles i fem komponenter: sædet, opbevaringskasse under-sædet, batterikassen, den bagerste del af den elektriske baseenhed og den forreste del af den elektriske baseenhed. **Se figur 6.**

Sådan skilles Go-Chair ad:

1. Sluk for styreenheden.
2. Placer Go-Chair i drivtilstand, hvis ikke allerede i drivtilstand. Se "Din Go-Chair."
3. Tag stikket ud af stikkontakten.
4. Fjern opbevaringskassen under sædet. Se "Komfortjusteringer."
5. Fjern sædet ved at løfte det lige op og ud af Go-Chair. Hvis du støder på modstand, når du fjerner sædet, skal du løsne sædeudløsningshåndtaget og dreje sædet frem og tilbage, mens du løfter op i sædet.
6. Tag fat i håndtaget på batterikassen, og løft op for at frigøre kassen fra den elektriske baseenhed, vip derefter kassen fremad og træk den væk fra den elektriske baseenhed.
7. Frakobl de to halvdele ved hjælp af frigørelsesarmen til rammen.

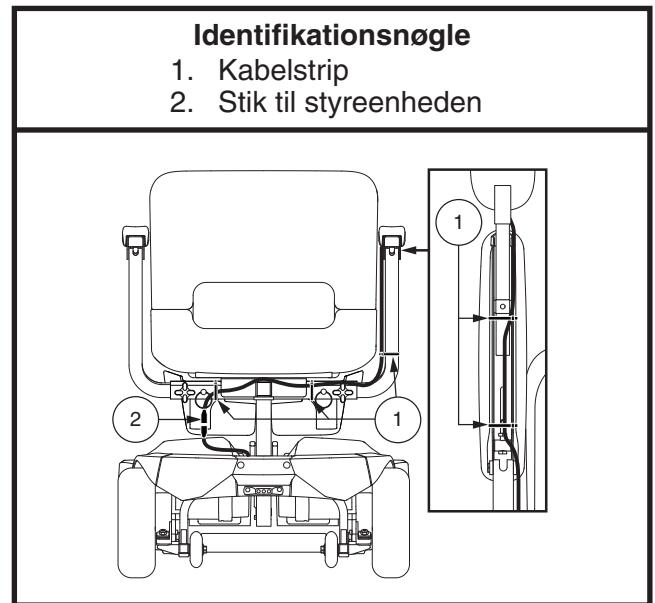


Figur 5. Installation af sæde

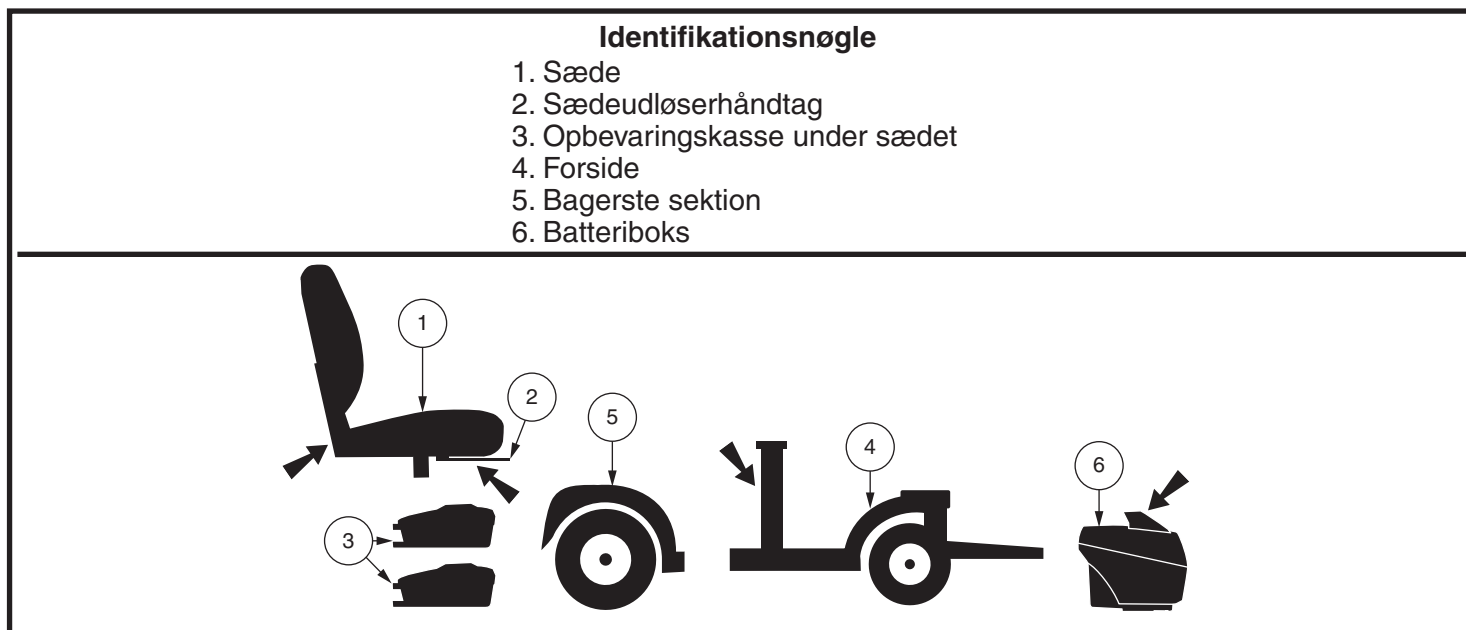

Figur 6. Komponenter på Go-Chair

Montage

1. Brug frigørelseshåndtaget til at løfte det forreste afsnit, når du justerer rammekroge på det forreste afsnit med det nederste rør i det bagerste afsnit. **Se figur 7.**
2. Når rammekroge er over det nedre rør, skal du sænke det forreste afsnit og dreje det bageste afsnit samtidigt. Dette aktiverer rammelåsen automatisk. **Se figur 7.**
3. Geninstaller batteripakken
4. Sæt sædet på igen, og drej det, indtil det er fastgjort på plads.
5. Sæt styreenheden i den elektriske baseenhed.
6. Geninstaller opbevaringskassen under sædet.

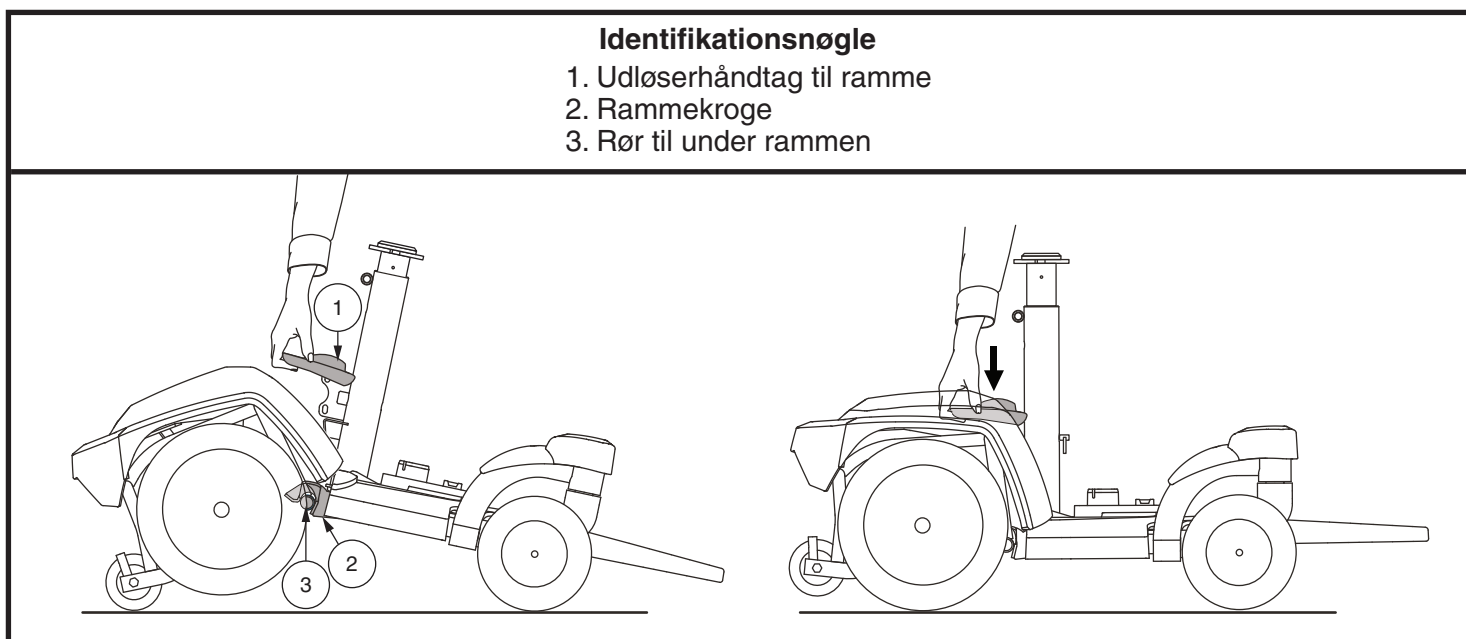

Figur 7. Styrelederforsamling

Komfortjusteringer

Når du er blevet fortrolig med din el-kørestols funktion, kan du muligvis finde behov for at foretage nogle justeringer for at øge din komfort, såsom sædehøjde, armlænsbredde, fodplatformdybde og position for styreenheden. Brug trinene nedenfor til at foretage komfortjusteringer.

ADVARSEL! Tyngdepunktet på din el-kørestol er fabriksindstillet til en position, der imødekommer det demografiske flertal af brugernes behov. Din autoriserede Pride udbyder har undersøgt din el-kørestol og foretaget de nødvendige justeringer, der passer til dine specifikke krav. Skift ikke din siddekonfiguration uden først at kontakte Pride Mobility Products eller din autoriserede Pride udbyder.



ADVARSEL! Nogle Go-Chair komponenter er tunge. Du har muligvis brug for hjælp til at løfte eller bære dem. Se specifikationstabellen for specifikke komponentvægte, før du adskiller el-kørestolen.

ADVARSEL! Fjern passageren fra Go-Chair, inden der foretages justeringer.

Du har muligvis brug for følgende for at foretage komfortjusteringer:

- metrisk/standard topnøglesæt og skralde
- justerbar skruenøgle
- metrisk/standard Unbrako-nøglesæt
- gevindlås


Justering af sædehøjde

Du kan indstille sædet til to forskellige højder i trin på 2,5 cm. Justering af sædehøjde kræver fjernelse af batterikassen.

Sådan ændrer du sædehøjden:

1. Sluk for styreenheden.
2. Sørg for, at el-kørestolen er i drivtilstand. **Se figur 3.**
3. Frakobl styreenheds-stikket fra den elektriske baseenhed. **Se figur 5.**
4. Fjern opbevaringskassen under sædet.
5. Frakobl sædeudløserhåndtaget.
6. Drej sædet til venstre eller højre, og træk det derefter op og ud af den elektriske baseenhed.
7. Fjern batterikassen.
8. Løsn hardware bagpå sædestolpen. **Se figur 8.**
9. Løft sædestolpen for højdejustering. **Se figur 8.**
10. Løft eller sænk den øverste sædestolpe til den ønskede position.
11. Genmonter højdejusteringsbolten.
12. Spænd hardware fast på sædet.
13. Geninstaller batteriboksen.
14. Sæt sædet på igen.
15. Geninstaller opbevaringskassen.
16. Forbind styreenheden igen til den elektriske baseenhed.

BEMÆRK: Hvis du vil dreje sædet, skal du bruge sædeudløserhåndtaget placeret under forsiden af sædet.

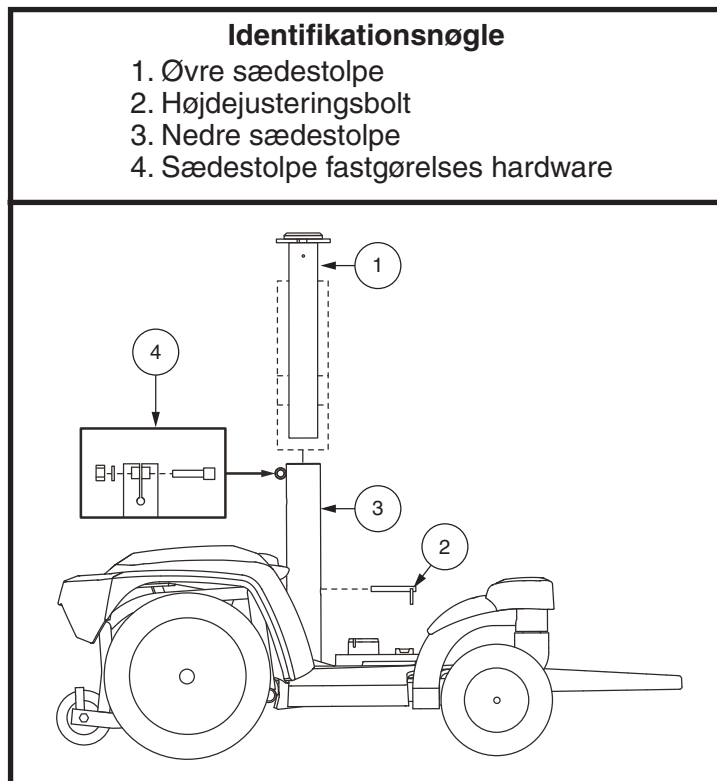

Figur 8. Justering af sædehøjde

Justering af armlænsbredden

Du kan ændre hver armlæns bredde uafhængigt af det andet.

BEMÆRK: Ændring af armlænsbredde kan øge den samlede bredde på din Go-Chair.

Sådan ændres armlænsbredden:


1. Find de to armlæns drejeknapper på hver side af sæderammen. **Se figur 9.**
2. Løsn drejeknapperne, og fjern spændestiften.
3. Skub armlænene ind eller ud til den ønskede bredde.
4. Spænd drejeknapperne, og sæt spændestiften i igen.

Justering af vinkel på fodplatformen


Du kan justere vinklen på fodplatformen. **Se figur 10.**

Sådan justeres fodplatformens vinkel:

1. Vend fodplatformen op, og find justeringsskruen.
2. Drej justeringsskruen for at hæve eller sænke forsiden af fodplatformen. **Se figur 10.**

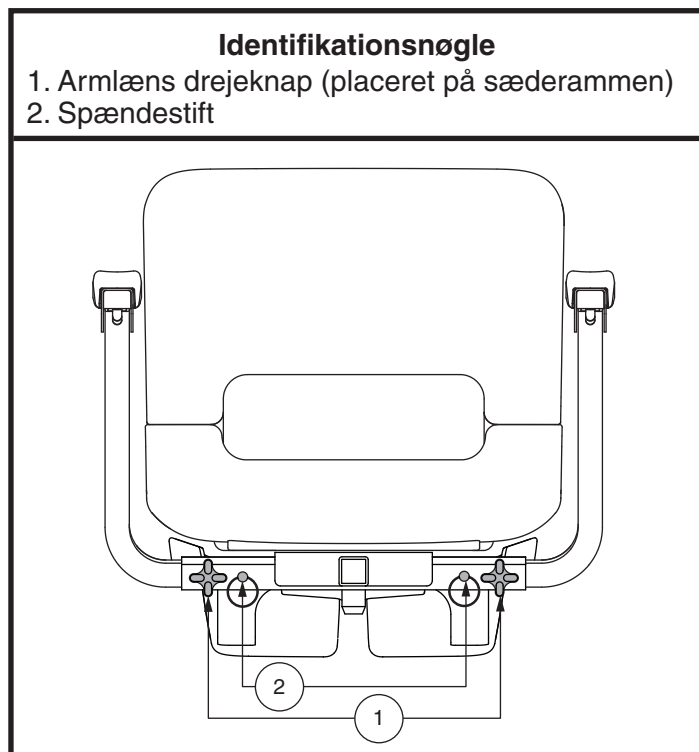

Figur 9. Justering af armlænsbredden

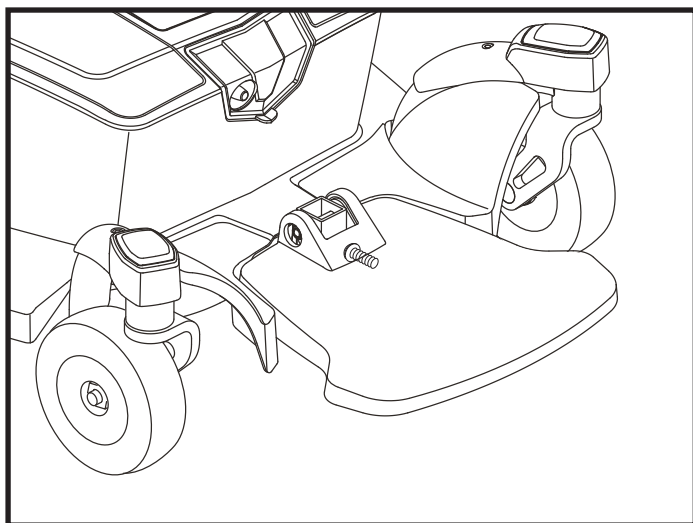

Figur 10. Justering af vinklen på fodplatformen

Position af styreenheden

Du kan placere styreenheden til enten venstre- eller højrehåndsbrug.



ADVARSEL! Placer ikke styreselen, så den kan klemmes fast i sæderammen eller i den elektriske baseenhed.

Sådan ændres styreenhedens position:

1. Sluk for styreenheden.
2. Klip kabelstrips der fastgør styreselen til armlænet op.
3. Sving armlænet op, og løsn skruen. **Se figur 11.**
4. Skub styreenheden ud af armlænet.
5. Løsn skruen i det andet armlæn.
6. Placer styreenheden i det andet armlæn.
7. Spænd skruen for at sikre styreenheden.
8. Brug en kabelstrip til at fastgøre styreselen til armlænet, så armlænet frit kan hæves og sænkes uden spænding på kabler, så de ikke rives løs.
9. Sæt styreenheden i stikket.

Opbevaring under sædet

Sådan betjenes opbevaringen under sædet

1. Løft en smule op i smæklåsen på siden, hvor opbevaringskassen under sædet er monteret (**se figur 12**) og sving opbevaringsbakken ud og væk fra el-kørestolen.
2. For at lukke opbevaringsbakken igen skal du skubbe opbevaringsbakken ind under sædet mod midten af el-kørestolen, indtil du hører låsen gribe fast igen.



ADVARSEL! Sørg for, at begge opbevaringskasser under sædet er låst fast, inden du bruger din el-kørestol.

Sådan fjernes opbevaringen under sædet


1. Løft en smule op i smæklåsen på siden hvor opbevaringskassen under sædet er monteret (**se figur 12**) og sving opbevaringsbakken ud og væk fra el-kørestolen, indtil den er helt åben.
2. Løft opbevaringskassen under sædet op og væk fra el-kørestolen.

Sådan installeres opbevaringen under sædet

1. Placer opbevaringskassen over fastgørelsesstolpen.
2. Sænk opbevaringsbolten under sædet ned på fastgørelsesstolpen, og opbevaringskassen mod midten af el-kørestolen, indtil du hører låsen gribe fast.

Identifikationsnøgle

1. Syltenød
2. Armlæns vinkeljusteringsskru
3. Controller Bracket modtager
4. Sætskru

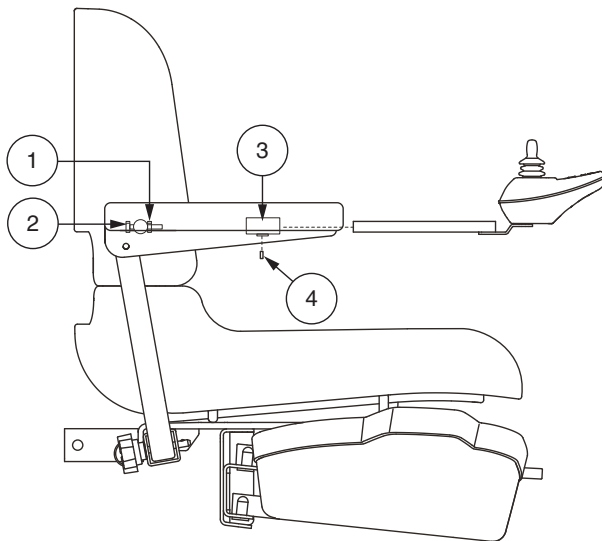

Figur 11. Stilling for styreenheden

Identifikationsnøgle

1. Lås
2. Fastgørelsesstolpen



Figur 12. Opbevaring under sædet

Positioneringsbælte

Din Go-Chair er muligvis udstyret med et positioneringsbælte, der kan justeres for førerkomforten. **Se figur 13.** Positioneringsbæltet er designet til at støtte operatøren, så han/hun ikke glider ned eller frem i sædet. Positioneringsbæltet er ikke designet til brug som en sikkerhedssele.

ADVARSEL! Positioneringsselen er ikke designet til brug som sikkerhedssele i et motorkøretøj. Enhver, der rejser i et køretøj, skal være ordentligt fastspændt i sæder, der er godkendt af køretøjsfabrikanten. Din el-kørestol er ikke egnet til brug som et sæde i ethvert køretøj med følgende undtagelse: Køretøjet skal være udstyret med et kørestolsbindings- og passagerfastholdelsessystem (WTORS), der er installeret i overensstemmelse med fastspændingsproducentens instruktioner, og er i overensstemmelse med ANSI/RESNA WC/ Vol. 4, Section 18/ISO 10542 standarder, og kørestolen skal have et transitsikringssystem, der er i overensstemmelse med ANSI/RESNA WC/ Vol. 4, Sektion 19/ISO 7176-19 standarder. Det er essentielt at bruge en komplet WTORS til at fastgøre el-stolen til køretøjet og for at give el-stolens passagerer et korrekt designet og testet sikkerhedsfastholdelsessystem. Et fastholdelsessystem med både bækken- og overkropsseler skal bruges til at beskytte el-stolens passager og minimere sandsynligheden for skader forårsaget af kontakt med køretøjet under et sammenstød eller pludselig opbremsning.



ADVARSEL! Positioneringsbæltet skal altid være fastgjort. Lad aldrig positioneringsbæltet hænge eller trække på gulvet, da det kan blive sammenfiltret.

Sådan installeres positioneringsbæltet:

1. Fjern den bagerste skrue, der holder låget til opbevaringskassen under sædet fast (se figur 4) til sædets bund på både venstre og højre sædehængsler.
2. Indsæt skruen gennem den medfølgende skive, gennem positioneringsbæltet og ind i sædebunden på hver side af sædet på el-kørestolen.
3. Spænd begge skruer.


Sådan justeres positioneringsbæltet:

1. Når du har sat dig, skal du sætte metallåsen på den ene side af bæltet i plastiklåsen på den modsatte side, indtil du hører et klik. **Se figur 13.**
2. Træk i den overskydende rem, der er fastgjort til metallåsen, indtil den er fast, men ikke så stram, at den forårsager ubehag.

Sådan frigøres positioneringsbæltet:

1. Tryk på tryknapmekanismen på plastiklåsen.

PÅKRÆVET! Sørg for, at positioneringsbæltet er ordentligt fastgjort til el-kørestolen og er indstillet til førerkomfort inden hver brug.

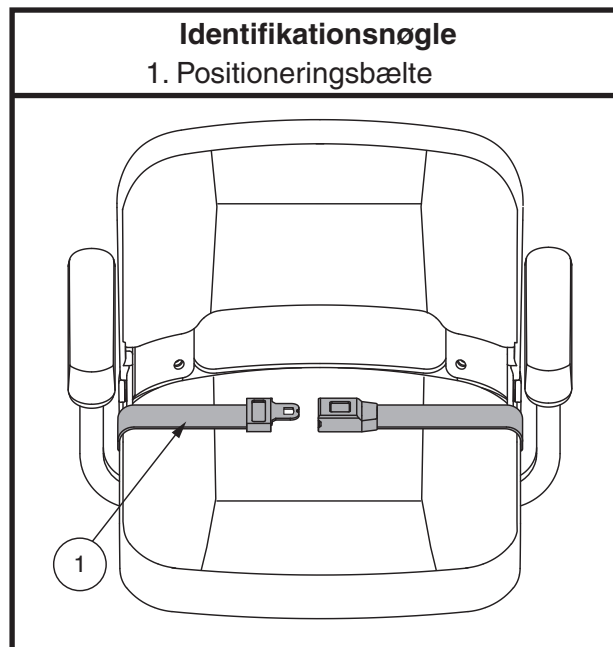

Figur 13. Positionering af bæltejustering



PÅKRÆVET! Kontroller positioneringsbæltet for løse dele eller skader, inklusive revner, pletter, bøjet beslag, beskadigede låsemekanismer eller snavs, før hver brug af el-kørestolen. Hvis du opdager et problem, skal du kontakte din autoriserede Pride udbyder.

Batterier og opladning

Go-Chairbrugertolangvarige 12-voltdybcyklusbatterier. Disse batterier er forsegledede og vedligeholdelsesfrie. Da de er forseglet, er det ikke nødvendigt at kontrollere elektrolytniveauet (væske). Dybcyklusbatterier er designet til at håndtere en længere og dybere udladning. Selvom de ligner almindelige bilbatterier, kan de ikke udskiftes. Bilbatterier er ikke designet til at håndtere en lang, dyb afladning og er heller ikke sikre til brug på el-kørestole.



PÅKRÆVET! Batteristolper, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder bly- og blyforbindelser. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når du håndterer batterier, og vask hænder efter håndtering.



FORBUDT! Brug altid to batterier af nøjagtigt samme type, kemi og ampere-timer (Ah) kapacitet. Se specifikationstabellen i denne manual og i den vejledning, der følger med batteriopladeren, for anbefalet type og kapacitet.



ADVARSEL! Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis du har spørgsmål til batterierne i din el-kørestol.

Opladning af batterierne

Batteriopladeren er vigtig for at give dine Go-Chair-batterier lang levetid. Den er designet til at optimere din el-kørestols ydelse ved at oplade batterierne sikkert, hurtigt og nemt. Batteriopladeren er kun funktionel, når opladerens strømstik er tilsluttet en stikkontakt.



FORBUDT! Fjernelse af jordforbindelse kan medføre elektrisk fare. Installer om nødvendigt en godkendt 3-polet adapter til en stikkontakt, der har 2-polet stikadgang.



FORBUDT! Brug aldrig en forlængerledning til at tilslutte din batterioplader. Sæt opladeren direkte i en korrekt kablet almindelig stikkontakt.



FORBUDT! Lad ikke børn, der ikke overvåges, lege i nærheden af Go-Chair, mens batterierne oplades. Pride anbefaler, at du ikke oplader batterierne, mens der sidder nogen i el-kørestolen.



PÅKRÆVET! Læs instruktionerne om opladning af batteriet i denne vejledning og i den vejledning, der fulgte med batteriopladeren, inden batterierne oplades.



ADVARSEL! Der kan opstå eksplosive gasser, når batterierne oplades. Hold Go-Chair og batteriopladeren væk fra antændelseskilder, såsom flammer eller gnister, og sørg for tilstrækkelig ventilation, når batterierne oplades.

ADVARSEL! Du skal oplade din Go-Chairs batterier med den medfølgende oplader. Brug ikke en batterioplader til biler.

ADVARSEL! Undersøg batteriopladeren, ledningerne og stikkene for skader inden hver brug. Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis der er skader.



ADVARSEL! Forsøg ikke at åbne batteriopladeren. Hvis batteriopladeren ikke ser ud til at fungere korrekt, skal du kontakte din autoriserede Pride-udbyder.

ADVARSEL! Vær opmærksom på, at batteriopladeren kan blive varm under opladning. Undgå hudkontakt og placér den ikke på overflader, der kan blive påvirket af varmen.

ADVARSEL! Hvis batteriopladeren er udstyret med køleåbninger, skal du ikke forsøge at indsætte genstande gennem disse åbninger.




ADVARSEL! Hvis din batterioplader ikke er testet og godkendt til udendørs brug, må du ikke udsætte den for ugunstige eller ekstreme vejrforhold. Hvis batteriopladeren udsættes for ugunstige eller ekstreme vejrforhold, skal den have tid til at vænne sig til forskellen i miljøforhold før brug indendørs. Se den vejledning, der fulgte med batteriopladeren, for mere information.

BEMÆRK: Go-Chair-batterierne kan oplades med batteriboksen enten installeret på el-kørestolen eller fjernet fra den elektriske baseenhed.

Sådan oplades batterierne ved hjælp af eksterne opladeren:

1. Placer forenden af din el-kørestol ved siden af en almindelig stikkontakt.
2. Sørg for, at styreenhedens strøm er slukket, og frihjulshåndtag er i aktiveret position. Se "Din Go-Chair."
3. Sæt den eksterne oplader i den eksterne oplader/programmeringsstik på styreenheden.
4. Sæt den eksterne oplader i stikkontakten.

ADVARSEL! LED-lysene på opladeren angiver forskellige opladerforhold på forskellige tidspunkter: Oplader tændt, oplader og opladning færdig. Hvis lysene ikke viser, at opladningen er afsluttet inden for 24 timer, skal du tage stikket fra opladeren ud og kontakte din autoriserede Pride-udbyder. Se vejledningen, der fulgte med opladeren, for at få en komplet forklaring af disse indikatorer.

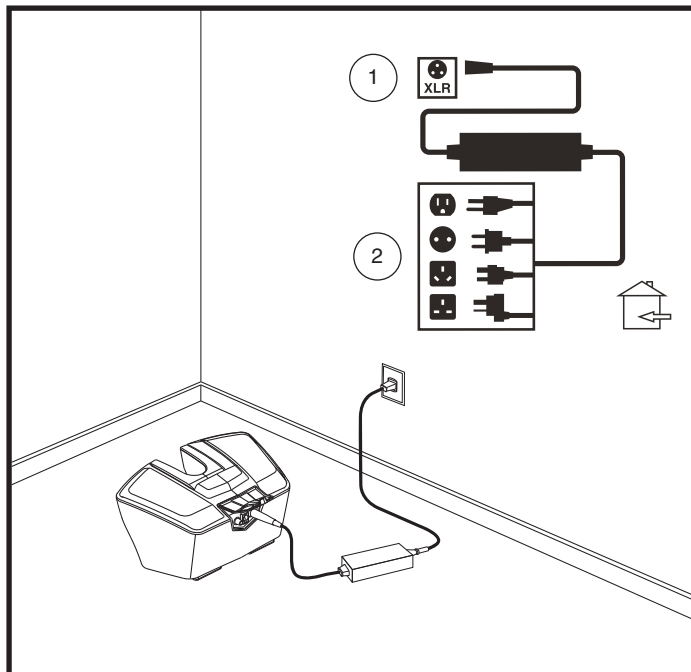

Figur 14. Opladning af batterierne

5. Når batterierne er fuldt opladet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og derefter ud af styreenheden.


Sådan oplades batterierne, når batteriboksen er fjernet fra strømbasen:

1. Fjern batteriboksen fra den elektriske baseenhed.
2. Placer batteriboksen ved siden af en almindelig stikkontakt.
3. Sæt den eksterne oplader i batteriboksens opladerport. **Se figur 14.**
4. Sæt den eksterne oplader i stikkontakten.


BEMÆRK: Hvis dette er en Pride ekstern oplader, er der to lys i den. Det røde lys indikerer, at strømmen til den eksterne oplader er tændt. Det grønne lys indikerer, at batterierne er fuldt opladet. Hvis det ikke er en Pride-ekstern oplader, skal du følge instruktionerne fra fabrikanten.

5. Når batterierne er fuldt opladet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og derefter ud af batteriboksen.
6. Sæt batteriboksen på plads igen.


BEMÆRK: Sluk for strømmen til styreenheden, og tag sædet ud, før du tager Go-Chair batteriboksen ud.

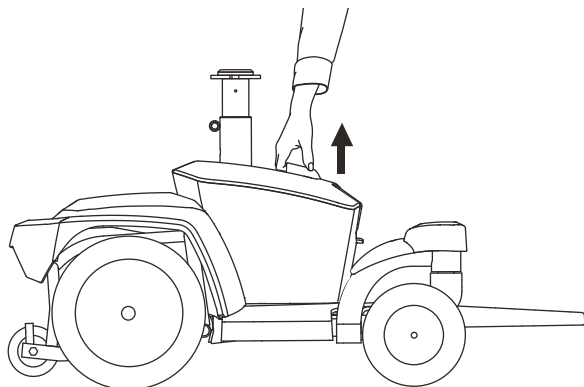


1. HVIS DU VIL FJERNE BATTERIBOKSEN, SKAL DU TAGE FAT I BATTERIBOKSENS HÅNDTAG OG LØFTE OP FOR AT FRIGØRE BOKSEN FRA DEN ELEKTRISKE BASEENHED.

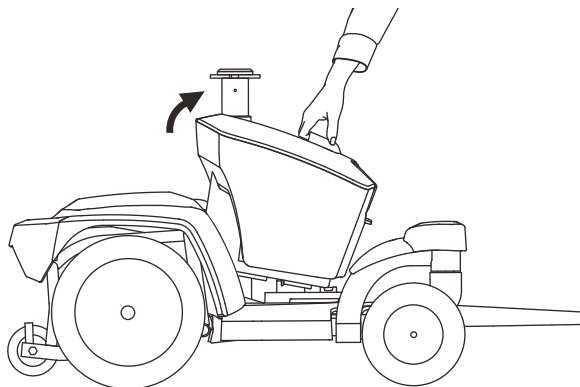


2. VIP BATTERIBOKSEN LIDT FREMAD.

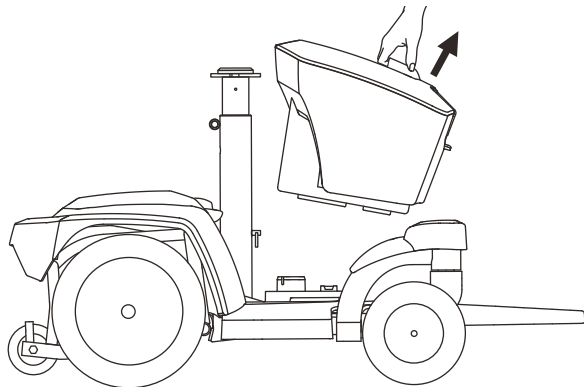


3. LØFT BATTERIBOKSEN VÆK FRA DEN ELEKTRISKE BASEENHED.

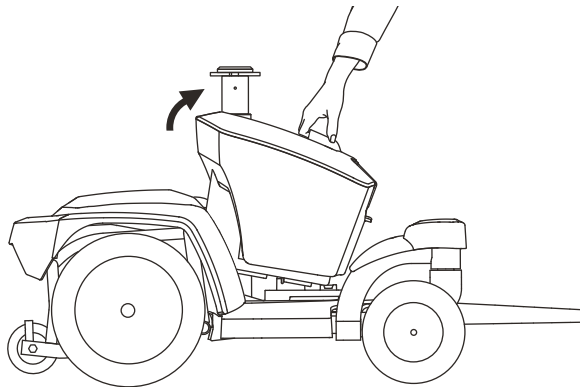

4. FOR AT INSTALLERE BATTERIBOKSEN, TAG FAT I BATTERIBOKSENS HÅNDTAG OG VIP DEREFTER BOKSEN LIDT FREMAD.

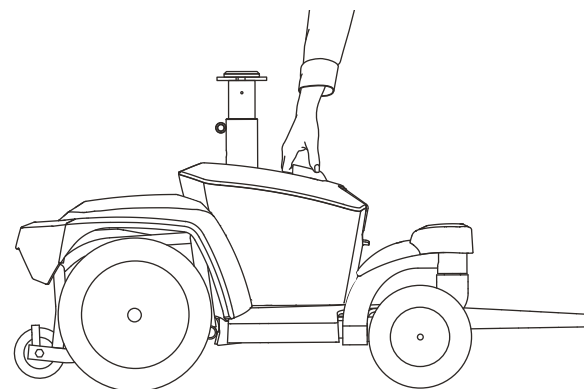

5. ANBRING BATTERIBOKSEN PÅ DEN ELEKTRISKE BASEENHED.

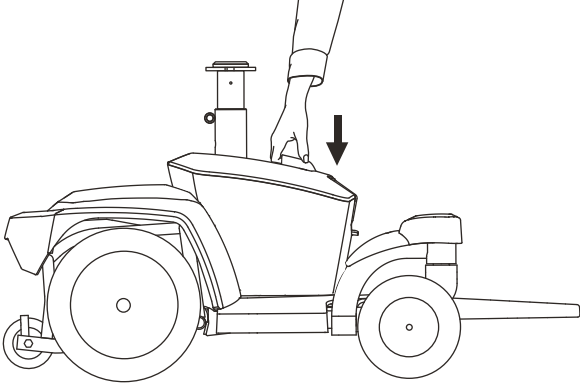

6. SKUB BAGSIDEN AF BATTERIBOKSEN NED, INDTIL DEN SIDDER ORDENTLIGT PÅ PLADS.

Figur 15. Fjernelse og installation af Go-Chair Batteriboks

Optimer batteriets levetid

Sådan bruges nye batterier for maksimal effektivitet:

1. Genoplad ethvert nyt batteri helt inden dets første brug. Dette bringer batteriet op til 90% af sit højeste ydelsesniveau.
2. Betjen din Go-Chair i huset og gården. Kør langsomt i starten, og kør ikke for langt, før du er vant til at bruge styreenheden og har optimeret dine batterier.
3. Giv batterierne endnu en fuld opladning på mindst 8-14 timer, og betjen din Go-Chair igen. Batterierne udfører nu over 90% af deres potentiale.
4. Efter fire eller fem opladningscyklusser tænder batterierne ved 100% opladning og holder i en længere periode.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer opladeren?

Batteriopladeren tager den almindelige elektriske udgangsspænding (vekselstrøm) og konverterer den til 24 VDC (jævnstrøm). Batterierne bruger jævnstrøm til at køre din Go-Chair. Når batterispændingen er lav, arbejder opladeren hårdere for at oplade batteriet. Når batterispændingen nærmer sig fuld opladning, arbejder opladeren ikke så hårdt for at afslutte opladningscyklussen. Når batteriet er fuldt opladet, er strømstyrken fra opladeren næsten nul. Sådan opretholder opladeren en opladning, men overoplader ikke batteriet.

Kan jeg bruge en anden batterioplader?

Du skal bruge den oplader, der følger med Go-Chair. Det er det sikreste og mest effektive værktøj til at oplade batterierne. Vi anbefaler ikke at bruge andre typer opladere (f.eks. en oplader til bilbatterier).

BEMÆRK: Din el-kørestols oplader virker ikke, når batterierne er afladet til næsten nul kapacitet. Hvis dette sker, skal du ringe til en autoriseret Pride-udbyder for at få hjælp.

Hvor ofte skal jeg oplade batterierne?

Mange faktorer kommer i spil, når du skal beslutte, hvor ofte batterierne skal oplades. Det kan være at du bruger din Go-Chair på daglig basis, eller det kan være at du ikke bruger den i flere uger ad gangen.

■ Daglig brug

Hvis du bruger din Go-Chair dagligt, skal du oplade batterierne, så snart du er færdig med at bruge din Go-Chair. Din Go-Chair vil være klar hver morgen til at give dig en hel dags service. Det anbefales, at du oplader batterierne mindst 8 til 14 timer efter daglig brug. Pride anbefaler, at du oplader dine batterier i yderligere 4 timer, efter at batteriopladeren har indikeret, at opladningen er afsluttet.

■ Sjældent brug

Hvis du bruger din Go-Chair sjældent (en gang om ugen eller mindre), skal du oplade batterierne mindst én gang om ugen i 24 timer.

BEMÆRK: Opbevar dine batterier fuldt opladet og undgå hel afladning af dine batterier. Se vejledningen, der fulgte med batteriopladeren, for opladningsinstruktioner. Pride anbefaler at oplade dine batterier i mindst 48 kontinuerlige timer en gang om måneden for at forbedre batteriets ydelse og batteriets levetid.

Hvordan kan jeg få maksimal rækkevidde eller afstand pr. Opladning?

Sjældent har du en ideel kørselssituation som glat, fladt, hårdt terræn uden vind, bakker eller kurver. Ofte bliver du præsenteret for bakker, fortovssprækker, ujævn og løst pakket overflader, kurver og vind. Alle disse faktorer påvirker afstanden eller køretiden pr. Batteriopladning. Nedenfor er et par forslag til opnåelse af det maksimale interval pr. Opladning:

- Oplad altid batterierne helt inden din rejse.
- Planlæg din rejse på forhånd for at undgå stigninger, hvis det er muligt.
- Begræns bagagevægt til vigtige genstande.
- Prøv at opretholde en jævn hastighed og undgå stop-and-go-kørsel.
- Pride anbefaler at oplade dine batterier i mindst 48 kontinuerlige timer en gang om måneden for at forbedre batteriets ydelse og batteriets levetid.

Hvilken type batterier skal jeg bruge?

Vi anbefaler dybcyklusbatterier, der er forseglede og vedligeholdelsesfrie. AGM-batterier er dybcyklusbatterier, der har samme ydeevne. Se specifikationstabellen for mere information om de batterier, der bruges med din Go-Chair.



ADVARSEL! Batterierne indeholder ætsende kemikalier. Brug kun AGM-batterier for at reducere risikoen for lækage eller eksplosive forhold.

Hvorfor virker mine nye batterier svage?

Dybcyklus-batterier anvender en meget anden kemisk teknologi end den, der bruges i bilbatterier, nikkel-cadmium (nicads) eller i andre almindelige batterityper. Dybcyklusbatterier er specifikt designet til at levere strøm, tømme deres opladning og derefter acceptere en relativt hurtig genopladning. AGM-batterier skal oplades så ofte som muligt. De har ikke en "hukommelse" som nikkel-cadmium-batterier.

Vi samarbejder tæt med vores batteriproducent for at levere et batteri, der bedst passer til din Go-Chairs specifikke krav. Friske batterier ankommer regelmæssigt til Pride og sendes straks med fuld opladning. Under forsendelse støder batterierne på ekstreme temperaturer, der kan have indflydelse på den første brug. Varme fjerner ladningen fra batteriet, og kulden bremser den disponible strøm og forlænger den tid, der kræves for at genoplade batteriet (ligesom med et bilbatteri).

Det kan tage et par dage, før batteriets temperatur stabiliseres og justeres til dets nye omgivelsestemperatur. Vigtigere er, at det tager et par "opladningscyklusser" (en delvis dræning - derefter en fuld opladning) for at etablere den kritiske kemiske balance, der er essentiel for batteriets maksimale ydeevne og lange levetid. Det vil være værd at tage tid til at optimere brugen af batteriet korrekt.

Hvordan kan jeg sikre maksimal batterilevetid?

Et fuldt opladet dybcyklusbatteri giver pålidelig ydelse og forlænget batterilevetid. Opbevar din Go-Chairs batterier fuldt opladet, når det er muligt. Batterier, der regelmæssigt og helt aflades, sjældent oplades eller opbevares uden fuld opladning, kan blive permanent beskadiget, hvilket kan forårsage upålidelig Go-Chair-drift og begrænset batterilevetid.

BEMÆRK: Batteriets levetid er ofte en afspejling af den pleje, det får.

Hvordan skal jeg opbevare min Go-Chair og dens batterier?

Hvis du ikke bruger din Go-Chair regelmæssigt, anbefaler vi, at du opretholder batteriets vitalitet ved at oplade batterierne mindst én gang om ugen.

Hvis du ikke har planer om at bruge din Go-Chair i en længere periode, skal du oplade batterierne helt inden opbevaring. Frakobl kablerne til batterierne, og opbevar Go-Chair i et varmt, tørt miljø. Undgå ekstreme temperaturer, såsom frost og overdrevent varme forhold, og prøv aldrig at oplade et frossent batteri. Et koldt eller frossent batteri skal opvarmes i flere dage før opladning.

Hvad med offentlig transport?

AGM og Gel-Cell batterier er designet til anvendelse i el-kørestole og andre mobilitetskøretøjer. Disse batterier er godkendt af Federal Aviation Administration (FAA), hvilket tillader sikker transport med fly, busser og tog, da der ikke er fare for spild eller lækage. Vi anbefaler, at du kontakter flyselskabet på forhånd for at få mere at vide om flyselskabets specifikke krav.

Hvad med forsendelse?

Hvis du ønsker at bruge et fragtfirma til at sende din Go-Chair til din endelige destination, skal du, hvis det er muligt, pakke din Go-Chair i den originale forsendelsescontainer og sende batterierne i separate kasser.

Pleje og vedligeholdelse

Din Go-Chair er et sofistikeret køretøj til rejsemobilitet. Som ethvert motoriseret køretøj kræver det rutinemæssig vedligeholdelseskontrol. Du kan udføre nogle af disse kontroller, men andre har brug for hjælp fra en autoriseret Pride udbyder. Forebyggende vedligeholdelse er meget vigtig. Hvis du følger vedligeholdelseskontrollerne i dette afsnit som planlagt, kan du hjælpe med at sikre, at din Go-Chair giver dig mange års problemfri drift. Hvis du er i tvivl om din Go-Chairs pleje eller drift, skal du kontakte en autoriseret Pride udbyder.



ADVARSEL! Servicer ikke Go-Chair, når der sidder en passager på sædet.

Din Go-Chair er som det mest elektriske udstyr modtagelig for skader fra elementerne. Undgå fugtige områder af enhver art.



ADVARSEL! Direkte eller langvarig eksponering af vand eller fugt kan resultere i en elektronisk eller mekanisk funktionsfejl af din Go-Chair. Vand kan forårsage, at elektriske komponenter korroderer, og stolens ramme rustner. El-kørestole bør undersøges regelmæssigt for tegn på korrosion forårsaget af vandeksponering, eksponering for kropsvæske eller inkontinens. Beskadigede komponenter skal udskiftes eller behandles straks.

Hvis din Go-Chair kommer i kontakt med vand:

1. Tør din Go-Chair så grundigt som muligt med et håndklæde.
2. Lad din Go-Chair stå et varmt, tørt sted i 12 timer for at lade vand fordampe.
3. Kontroller styreenhedens drift og bremses, før du bruger din Go-Chair igen.
4. Hvis der er uoverensstemmelser, skal du tage din Go-Chair til en autoriseret Pride udbyder. El-kørestole, der ofte udsættes for vandkilder, såsom inkontinens, skal ofte inspiceres for korrosion, og det kan være nødvendigt at udskifte elektroniske komponenter ofte.

Temperatur

- Selvom din lænestol kan modstå kortsigtede opbevaringstemperaturer mellem -40° F (-40° C) og 149° F (65° C), anbefales det, at langvarig opbevaringstemperatur er mellem -13° F (-25° C) og 122° F (50° C). Ideelle opbevaringsforhold er 68° F (20° C) til 70° F (21° C), hvor det er muligt, men vi er klar over, at det ikke altid er muligt på grund af forskellige klimaer og miljøer.
- I ekstremt kolde temperaturer kan batterierne fryse. Den specifikke temperatur, hvor de fryser, afhænger af en række faktorer, såsom batteriopladning, brug og sammensætning af batterierne (f.eks. AGM).

Generelle retningslinjer

- Undgå at slå eller banke på styreenheden.
- Undgå langvarig udsættelse af din Go-Chair for ekstreme forhold, såsom varme, kulde eller fugt.
- Hold styreenheden ren.
- Kontroller alle stik for at sikre, at de alle er stramme og fastgjort korrekt.
- Hvis din el-kørestol er forsynet med pneumatiske dæk, skal du sørge for, at de pneumatiske dæk er pumpet til det psi/bar/kPa lufttryk, der er angivet på hvert dæk.



ADVARSEL! Sørg for, at pneumatiske dæk er pumpet til lufttrykket psi/bar/kPa, der er angivet på hvert dæk. Undgå at pumpe dine dæk for meget eller for lidt. Lavt tryk kan resultere i tab af kontrol, og dæk der er pumpet for meget op kan sprænge. At pumpe dækkene for meget op, kan få dem til at eksplodere.

ADVARSEL! Brug ikke en højtryksslange til at pumpe dine dæk op.

- Brug en gummipleje på dækkets sidevægge for at hjælpe med at bevare dem.



ADVARSEL! Brug aldrig gummipleje på dækkenes kontaktflade, dette kan gøre, at dækkene bliver glatte og får din el-kørestol til at glide.

- Alle hjullejer er forsmurt og forseglet. De kræver ingen efterfølgende smøring.
- Hvis din kørestol har en kropsskærm med en **blank finish**, er kropskappen sprøjtet med en klar tætningsbelægning. Du kan anvende et let lag bilvoks for at hjælpe med at bevare sit højglansudseende. Hvis din kørestol har en kropskappe med en **mat finish**, skal du bruge KUN produkter udviklet til matfinishmaling. Brug ikke voks, detalje spray, ArmorAll® eller noget produkt, der er fremstillet til blank maling.



ADVARSEL! Vælg det rigtige produkt for at beskytte finishen på din kørestols kappe. KUN produkter, der er udviklet til matfinish maling, skal bruges på hylstre med mat finish. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre beskadigelse af afdækningens matte lakfinish.

- Kontroller alle elektriske forbindelser. Sørg for, at de er stramme og ikke er korroderede. Batterier skal sidde fladt i batteribakken med batteripolerne vendt indad mod hinanden. Der henvises til batteriet ledningsdiagram for korrekt ledningsføring.



ADVARSEL! Selvom Go-Chair har bestået de nødvendige testkrav til indtrængen af væsker, skal du holde elektriske forbindelser væk fra kilder til fugt, inklusive direkte eksponering for vand eller kropsvæsker og inkontinens. Kontroller ofte elektriske komponenter for tegn på korrosion, og udskift om nødvendigt.

Daglig kontrol

- Tjek joystick, når styreenheden er slukket. Sørg for, at det ikke er bøjet eller beskadiget, og at det vender tilbage til den neutrale position, når du slipper det. Kontroller gummiets omkring bunden af styreenheden for skader. Kontroller gummiets visuelt. Undgå at håndtere eller forsøge at reparere det. Kontakt en autoriseret Pride-udbyder, hvis der er et problem.
- Undersøg styreselen visuelt. Sørg for, at den ikke er flosset, klippet eller har nogen ledninger der er udsat for fri adgang. Kontakt en autoriseret Pride-udbyder, hvis der er et problem.
- Kontroller for flade steder på solide dæk. Flade steder kan påvirke stabiliteten negativt.
- Undersøg sædesystemet, armlænen og forankringerne foran for løs hardware, spændingspunkter eller skader. Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis der er et problem.

Ugentlig kontrol

- Frakobl og inspicér styreenheden fra den elektriske baseenhed. Se efter korrosion. Kontakt om nødvendigt en autoriseret Pride-udbyder.
- Sørg for, at alle dele af styresystemet er sikkert fastgjort til din Go-Chair. Stram ikke nogen skruer for meget.
- Kontroller, om dækkene er pumpet korrekt. Hvis et dæk ikke holder luft, skal du kontakte din autoriserede Pride udbyder for udskiftning af slangen.
- Kontroller bremsene. Denne test skal udføres på en jævn overflade med mindst 1 meter (3 fod) fri afstand omkring din Go-Chair.

Sådan kontrolleres bremsene:

1. Tænd for styreenheden, og skru ned for hastigheden på din Go-Chair.
2. Efter et sekund skal du kontrollere batteriets tilstand. Sørg for, at det forbliver tændt.
3. Skub langsomt styreenheden fremad, indtil du hører de elektriske bremses klikke. Slip straks styreenheden. Du skal være i stand til at høre hver elektrisk bremse aktivere inden for et par sekunder efter bevægelsen af styreenheden. Gentag denne test tre gange, skub styreenheden bagud, derefter til venstre og derefter til højre.

Månedlig kontrol

- Kontroller for slitage på dæk. Se en autoriseret Pride-udbyder for reparation.
- Kontroller svinghjulene for slitage. Udskift dem efter behov.
- Kontroller armene til svinghjulene for skader, hvilket indikerer, at de muligvis skal justeres eller lejerne skal udskiftes. Kontakt en autoriseret Pride-udbyder for reparation.
- Kontroller hele el-kørestolen for løs hardware og ændringer i el-kørestolens funktion eller ydeevne. Kontakt din autoriserede Pride-udbyder for service og reparation.
- Hold din Go-Chair ren og fri for fremmed materiale, såsom mudder, snavs, hår, mad, drikke osv.

Årlig kontrol

Tag din Go-Chair til en autoriseret Pride udbyder for årlig vedligeholdelse, især hvis du bruger din el-kørestol dagligt. Dette hjælper med at sikre, at din Go-Chair fungerer korrekt og hjælper med at forhindre fremtidige komplikationer.

Opbevaring

Din Go-Chair skal opbevares på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for ekstreme temperaturer. Når du opbevarer den, skal du fjerne batterierne fra Go-Chair. Se "Batterier og opladning."



ADVARSEL! Hvis du ikke opbevarer enheden korrekt, kan rammen ruste, og elektronikken kan blive beskadiget.

Batterier, der regelmæssigt og helt aflades, sjældent oplades, opbevares i ekstreme temperaturer eller opbevares uden fuld opladning kan være permanent beskadiget, hvilket kan forårsage upålidelig ydelse og begrænset levetid. Det anbefales, at du oplader batterierne regelmæssigt i perioder med langvarig opbevaring for at sikre korrekt ydelse.

Det kan være nødvendigt at placere flere klodser under rammen på din Go-Chair for at hæve den væk fra jorden i perioder med langvarig opbevaring. Dette fjerner vægten fra dækkene og reducerer muligheden for, at der opstår flade steder på kontaktholderne, der kommer i kontakt med jorden.

Bortskaffelse af din Go-Chair

Din Go-Chair skal bortskaffes i henhold til gældende lokale og nationale lovbestemmelser. Kontakt dit lokale affaldsselskab eller en autoriseret Pride udbyder for information om korrekt bortskaffelse af emballage, metal rammekomponenter, plastkomponenter, elektronik, batterier, neopren, silikone og polyuretanmaterialer.



ADVARSEL! Plastposer er en kvælningssfare. Bortskaf plastikposer korrekt og lad ikke børn lege med dem.

Rengøring og desinfektion

Der skal tages forholdsregler ved rengøring af medicinsk udstyr/udstyr for at mindske risikoen for spredning af infektion. Dette er for at begrænse spredningen af sygdom og andet potentielt smitsomt materiale (OPIM) (blodkomponenter).

- Brug en fugtig klud og mild, ikke-slibende rengøringsmiddel til at rengøre plast- og metaldelene på din Go-Chair. Undgå at bruge produkter, der kan ridse overfladen på din el-kørestol.
- Rengør om nødvendigt dit produkt med et godkendt desinfektionsmiddel. Sørg for, at desinfektionsmidlet er sikkert til brug på dit produkt før påføring.

Sådan rengøres/desinficeres udstyr:

Hårde/bløde overflader (plastikskærme, metalramme, sædestof, dæk, armlæn og fodplademåtter, alt efter hvad der er relevant)

- For hårde/bløde overflader, fjern synlig forurening, hvis den er til stede.
 - Til plast- og metalbrug Lysol®/Clorox® desinficerende spray/servietter og andre kvalificerede SARS-CoV-2 desinfektionsprodukter.
 - For andre vinyloverflader, rengør med vinylsikre desinfektionsservietter eller -opløsninger

■ Foreslåede desinfektionsmidler

- Birex® SE desinfektionsmiddel, Bleach-Rite® desinfektionsspray, Citrace® bakteriedræbende middel
- Dispatch® Spray Hospital Cleaner desinfektionsmiddel med blegemiddel
- Fortyndet blegemiddelopløsning (10 % fortynding eller mindre); Bemærk: Blegemiddel med pH-faktor mellem 7 og 9 er velegnet; et produkt med en pH-værdi på 10,5 eller højere kan beskadige vinyloverfladens integritet over en længere periode.

■ Desinficerende servietter

- Clorox, Green Works, PDI Sani-Cloth HB Wipes, Lysol, Oxivir, Virox og CaviWipes.

- Til dækrensning skal du rengøre med hylde-/hjulrensere

Elektronik (Joystick-controller, forbedrede skærme, berøringsskærme, fjernbetjeninge, tastaturer, mobiltelefoner og tablets, alt efter hvad der er relevant)

- For elektronik, fjern synlig forurening, hvis den er til stede.
 - Sluk for enheden, og frakobl batterierne.
 - Sprøjt aldrig væsker direkte ind i produktet/produkterne.
 - Fugt en mikrofiberklud med en blanding af 70 % isopropylalkohol/30 % vandopløsning. Kluden skal være fugtig, men ikke dryppende eller for våd. Tør overflader grundigt for at undgå sammenblanding af væsker og før boksning.


ADVARSEL! Følg alle sikkerhedsinstruktioner for korrekt brug af desinfektionsmidlet og/eller rengøringsmidlet, før det påføres dit produkt. Manglende overholdelse kan føre til hudirritation eller forringelse af polstring og/eller el-kørestolens finish.

ADVARSEL! Brug aldrig rengørings- eller desinfektionsmidler, opløsningsmidler, smøremidler eller andre produkter på dit mobilitetsprodukts bremseklodser, bremseklodser, gearkasse, motor/gearkasse. Hvis du gør det, kan det beskadige komponenterne og/eller få dem til ikke at fungere korrekt. Ejendomsskade og/eller personskaade kan medføre.



ADVARSEL! Vask aldrig din el-kørestol med en haveslange, eller lad den komme i direkte kontakt med vand. Din el-kørestol har et malet ABS-karosseri, der gør det nemt at aftørre el-kørestolen med en fugtig klud.

ADVARSEL! Brug aldrig kemikalier til at rengøre et vinylsæde, da det kan medføre, at sædet bliver glat eller tørre ud og revner. Brug sæbevand og tør sædet grundigt.

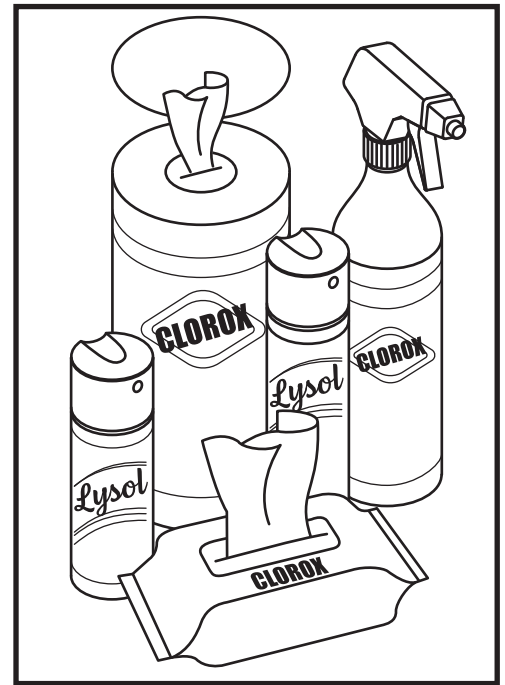

Udskiftning af hjul

Hvis din el-kørestol er udstyret med et solid dæk, skal du udskifte hele hjulkonstruktionen. Erstatningsdele er let tilgængelige via en autoriseret Pride udbyder.

ADVARSEL! Hjulene på din el-kørestol må kun serviceres af en autoriseret Pride udbyder eller en kvalificeret tekniker.



ADVARSEL! Sørg for, at strømmen til styreenheden er slukket, og at el-kørestolen ikke er i frihjulstilstand, før du udfører denne procedure.

ADVARSEL! Når du udskifter dækket, skal du kun fjerne hjulbolten og spændeskiven og derefter fjerne hjulet. Hvis der er behov for yderligere adskillelse, tøm dækket helt, eller kan det eksplodere.

Sådan skiftes hjulet:

1. Sluk for styreenheden.
2. Sæt Go-Chair op på blokke.
3. Fjern hjulbolten og spændeskiven fra akslen. **Se figur 16.**
4. Træk hjulet af akslen.
5. Skub det nye hjul tilbage på akslen. Sørg for, at nøglen er i akselåbningen.




ADVARSEL! Sørg for, at aksel nøglen er korrekt installeret i akselåbningen, når hjulet monteres. Hvis bremsen og drivsystemerne ikke er installeret korrekt, kobles de fra, hvilket kan forårsage personskade eller produktskade.

6. Genmonter hjulbolten og spændeskiven på akslen, og spænd dem til.



ADVARSEL! Sørg for, at både hjulbolt og spændeskive er geninstalleret og strammes korrekt.

7. Fjern Go-Chair fra blokkene.

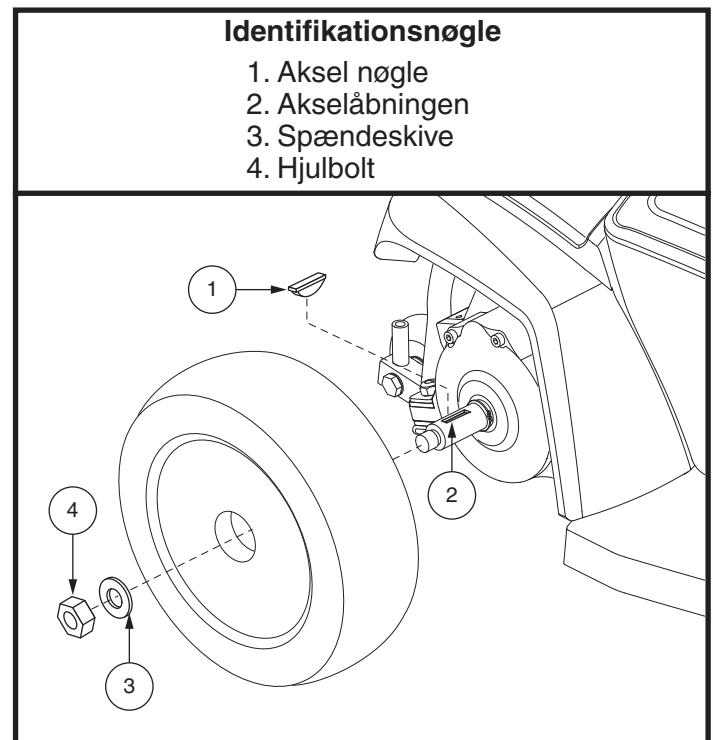

Figur 16. Go-Chair hjul

Udskiftning af batteri

Et kabelforbindelsesdiagram er trykt på et klistermærke, der er placeret inde i batteriboksen. Se specifikationstabellen for korrekte batterispecifikationer.



OBLIGATORISK! Batteristolper, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder bly- og blyforbindelser. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når du håndterer batterier, og vask hænder efter håndtering.

ADVARSEL! Batterierne i din el-kørestol må kun repareres eller udskiftes af en autoriseret Pride udbyder eller en kvalificeret tekniker.

ADVARSEL! Udskift ikke batterierne, når der sidder nogen i stolen.



ADVARSEL! Batterierne i din Go-Chair er tunge. Se specifikationstabellen. Hvis du ikke er i stand til at løfte så meget vægt, skal du sørge for at få hjælp. Brug passende løfteteknikker og undgå at løfte mere end hvad du kan.

ADVARSEL! Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift altid begge batterier på samme tid.




FORBUDT! Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteripolerne. Kontakt med værktøj kan forårsage elektrisk stød.

Du har muligvis brug for følgende for at skifte batterier:

- metrisk/standard topnøglesæt og skralde
- justerbar skruenøgle
- skruetrækker

Sådan udskiftes batterierne:

1. Fjern batterikassen fra Go-Chair.
2. Vend kassen på hovedet.
3. Fjern alle skruer, der holder batterikassens halvdele sammen. **Se figur 17.**
4. Vend batterikassen om, så håndtaget er opad, og fjern låget.
5. Fjern de røde (+) positive og sorte (-) negative batterikabler fra hvert batteri.
6. Løsn krog- og loopbåndene fra begge batterier.
7. Fjern batterierne.
8. Sæt de nye batterier ned i batteriboksen (batteriklemmerne vender op og vender mod midten af el-kørestolen).
9. Spænd krogen og loopbåndene omkring begge batterier.
10. Forbind de to (2) batterikabler igen til batteripolerne. Sørg for, at det røde kabel er tilsluttet den positive (+) terminal og det sorte kabel er tilsluttet den negative (-) terminal.
11. Sæt låg på igen, og vend batterikassen forsigtigt om, så håndtaget er nede.
12. Udskift og spænd alle skruer, der holder batteriboksen sammen.
13. Geninstaller batteriboksen tilbage på Go-Chair.

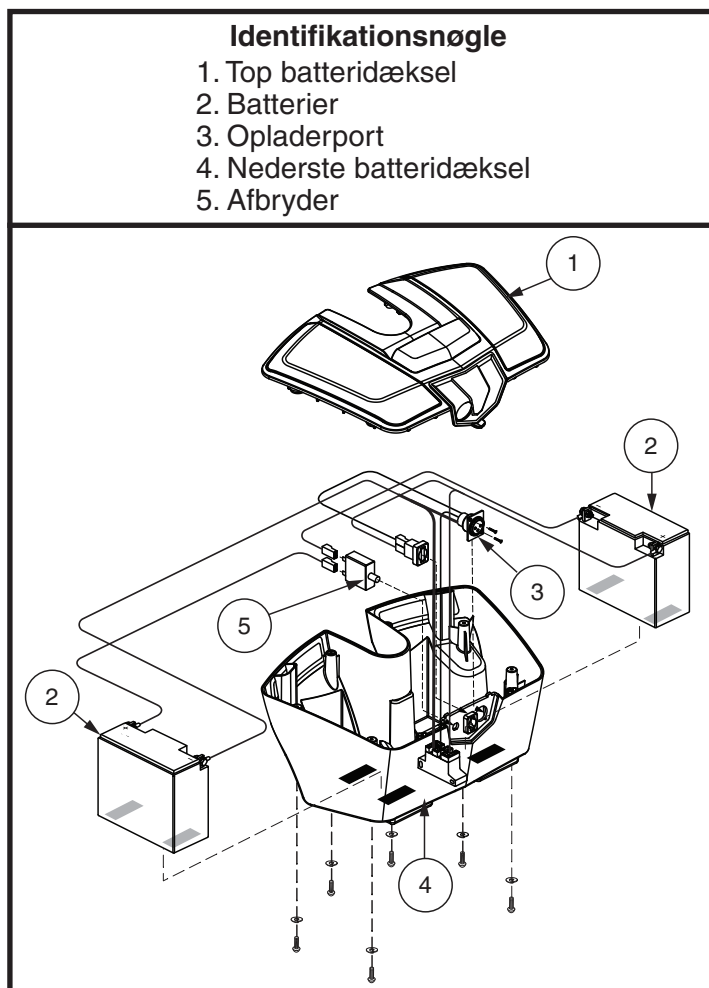

Figur 17. Go-Chair batteriboks

Hvornår skal man kontakte en autoriseret Go-Chair udbyder for service

Følgende symptomer kan indikere et alvorligt problem med din Go-Chair. Kontakt om nødvendigt en autoriseret Pride-udbyder. Når du ringer, skal du have modelnummer, serienummer, problemets art og fejlkoden, hvis den er tilgængelig.

- Motorstøj
- Ødelagt sele
- Knækkede eller ødelagte stik
- Ujævn slitage på et af dækkene
- Rystende bevægelse
- Trækker til den ene side
- Bøjede eller ødelagte hjulsamlinger
- Tænder ikke
- Tænder, men bevæger sig ikke
- Løst sæde- eller sædekomponenter

Korrekt vedligeholdelse

Hvis batteriets tilstand ikke lyser, når du tænder for strømmen:

- Kontroller seleforbindelserne. Sørg for, at de er stramme.
- Kontroller afbryderen. Nulstil det om nødvendigt.
- Kontroller batteriforbindelserne.

Hvis ovenstående forhold viser sig at være normale, kan du teste af batterierne med en batterimåler. Disse testere fås i bilindustrien. Frakobl begge batterier inden testen, og følg instruktionerne, der følger med batterimåleren. Hvis ét af batterierne ikke består testen, skal du udskifte dem begge. Hvis din Go-Chair stadig ikke tænder, skal du kontakte en autoriseret Pride udbyder.

PRIDE[®]

M O B I L I T Y

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.pridemobility.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L3J 1V4
www.pridemobility.ca

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

Unit 5/208 Swanson Road
Henderson, Auckland 0610
www.pridemobility.co.nz

UK

(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

The Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.pride-mobility.nl
www.pridemobility.eu

Italy

Via del Progresso-ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.pridemobility.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.pridemobility.de

China

Room 508, Building #4, TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road, Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

Produktets serienummer



UDI-etiket (hvis relevant)

